

TEST COVID-19



Características:

- La prueba rápido de COVID-19 es un kit en el sitio con un solo panel para la detección más simple de coronavirus por IgM / IgG en 10-15 minutos, ya sea que haya estado expuesto al virus dentro del últimos 4 a 24 días.
- La prueba es muy simple: Se toman dos gotas de sangre de la punta del dedo de un paciente y se colocan en la ventana de muestra de un casete de prueba, junto con dos gotas de solución tampón.
- Este kit Incluye:
 - Bolsa de aluminio para 25 pruebas (casetes).
 - 25 pipetas.
 - 25 algodón.
 - 25 toallas de alcohol.
 - 25 lancetas.
 - 1 paquete insertado.

Resultados:

- **Positivo:** la línea de control y al menos una línea de prueba aparecen en la membrana. La aparición de la línea de prueba de IgG indica la presencia de nuevos coronavirus específicos para anticuerpos IgG. La aparición de la línea de prueba IgM indica la presencia de nuevos anticuerpos IgM de coronavirus. Y si aparecen las líneas IgG e IgM, indica que hay presencia de ambos coronavirus nuevos específicos para los anticuerpos IgG e IgM.
- **Negativo:** aparece una línea de color en la región de control (C). No aparece una línea de color aparente en la región de la línea de prueba.
- **Inválido:** la línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falla de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba de inmediato y comuníquese con su distribuidor local.



texam.cl



ventas@texam.cl



+56 2 24020550